

TOTO


多功能扶手

为了充分发挥产品功能,请按本使用说明书内容正确安装

明 细 单

GT300H7系列单柄坐便器用扶手（可抬起式）	
扶手组品	1套
锚固螺栓(M8×80)*4、锥形螺母(M8×11)*4、金属膨胀管(Φ11.5×70)*4、内六角匙(S5×72)*1	1包
GT300CU1系列小便器用扶手	
扶手组品	1套
自攻螺丝(Φ6×50)*4、膨胀管(Φ10×50)*4	4包
螺丝(M5×12)*4、圆支点盖*2	1包
GT300CP1系列壁挂式洗面器用扶手	
扶手组品	1套
自攻螺丝(Φ6×50)*4、膨胀管(Φ10×50)*4	4包
螺丝(M5×12)*4、圆支点盖*2	1包

完 成 图

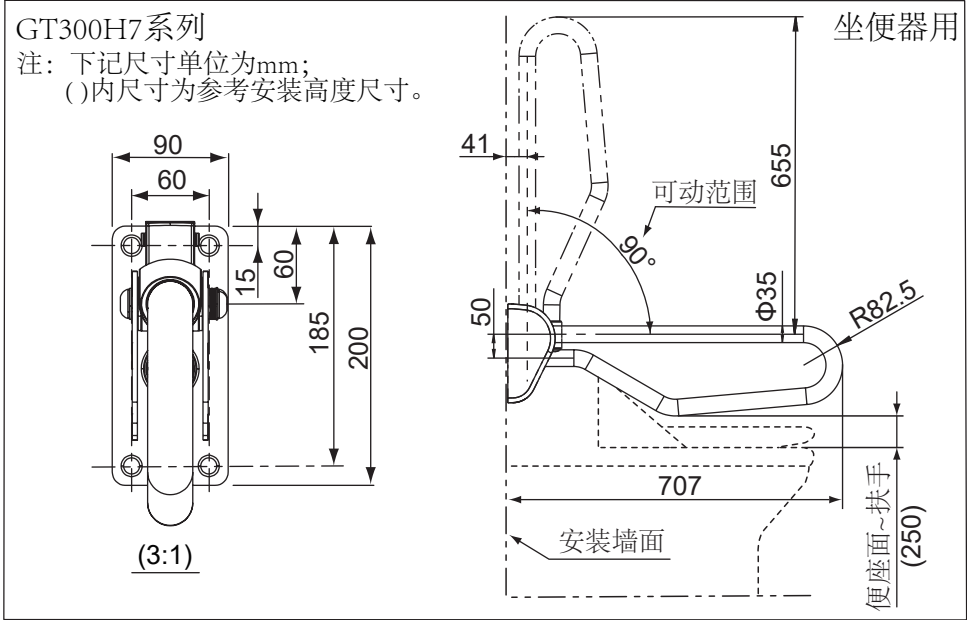

1

安 装 前 的 注 意

1. 安装扶手前请配带手套。
2. 安装扶手的墙壁有足够的强度。
3. 扶手不能安装在屋外和平常接触水的地方。
4. 安装请根据建筑的结构选用合适的方法。
5. 和带感应商品组合使用时，扶手请安装在感应不到的位置。
6. 必须使用同捆的固定五金件进行安装,否则会有强度不足的风险。
7. 同捆的固定五金件不能安装在灰砂砖墙上。
8. 安装可抬起式扶手的情况，扶手可动范围内，没有障碍物；扶手安装后，请确认功能。


小便器/洗面器用扶手的安装

安装前扶手组装：


※圆连接垫和连接件到货时是已经连接好的状态

步骤如下：


- ①将圆支点盖套入上握杆
- ②上握杆插入连接件
- ③预拧紧螺丝（勿完全拧紧）

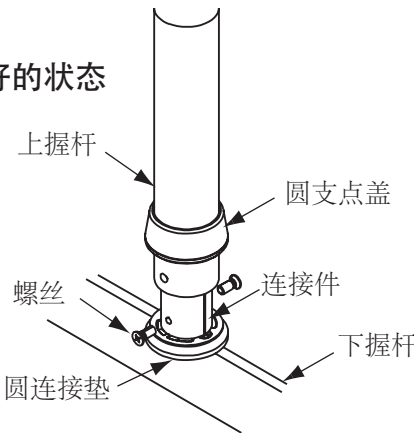

1．混凝土：螺丝与膨胀管固定的情况

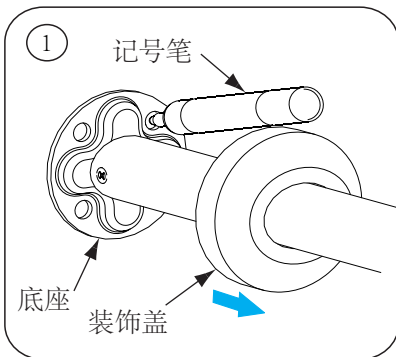



先向后推开装饰盖，然后根据使用情况，用记号笔对准底座安装孔在墙面上标注钻孔位置。

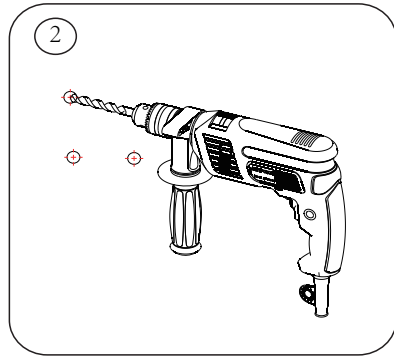

对准记号笔标注的位置钻Φ10mm，深50mm的孔(若安装的墙面贴有瓷砖时，请先用Φ10玻璃钻头钻穿瓷砖后，再用冲击钻进行墙面钻孔)。


3

完 成 图

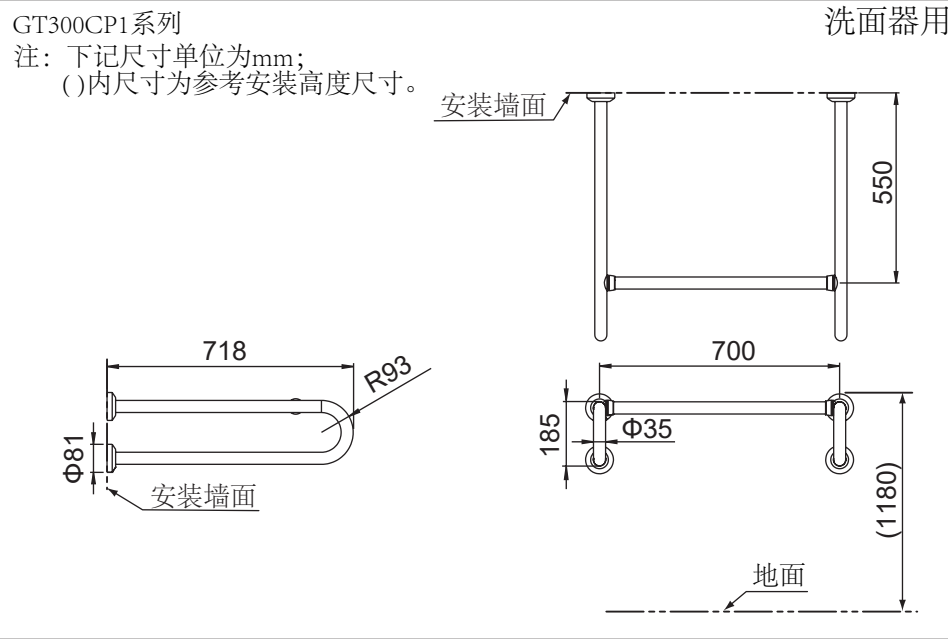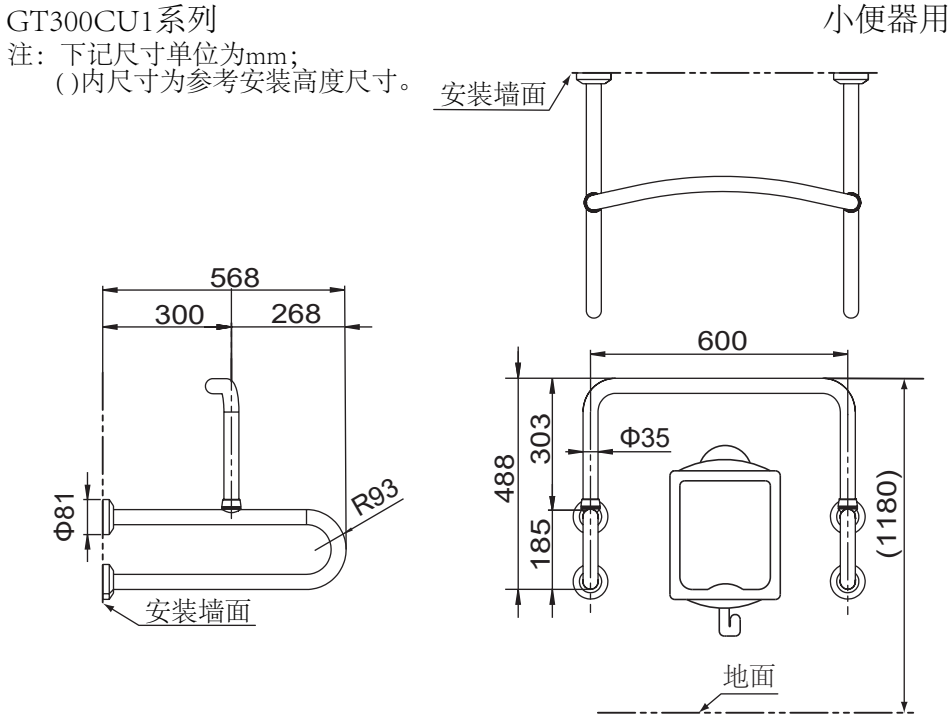


2


小便器/洗面器用扶手的安装

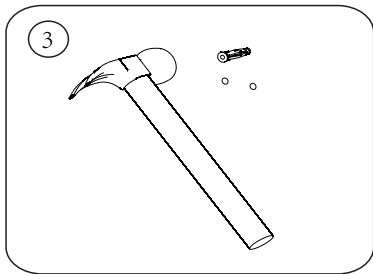


将膨胀管分别插入钻好的孔中，用锤子将其敲至与墙面齐平；建议在螺丝安装孔周围涂布硅胶。

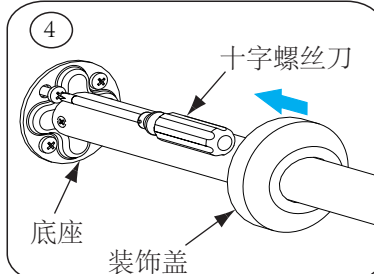

将底座孔与膨胀管孔对齐，用十字螺丝刀将自攻螺丝均匀用力拧紧，然后确认墙面和底座没有间隙后，再把装饰盖按压到墙面。

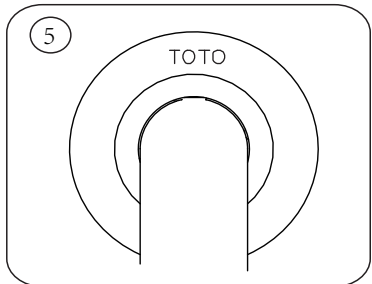


安装完成状态装饰盖的TOTO向上。

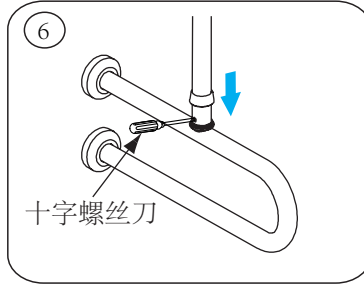


拧紧上握杆处螺丝（完全拧紧），最后盖上圆支点盖

2．木墙体：螺丝固定的情况

※必须安装厚度50mm以上的加固木。厚度不满足50mm的情况，扶手有脱落、墙体会破坏的风险。

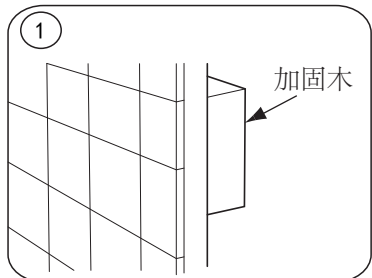


事先在扶手安装部位的反面安装厚度50mm以上的加固木。

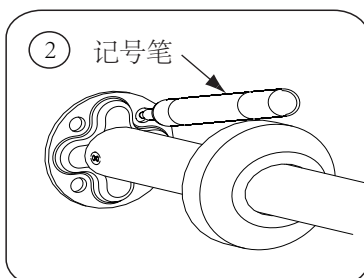

根据使用情况，用记号笔对准底座安装孔在墙面上标注钻孔位置。

4

小便器/洗面器用扶手的安装

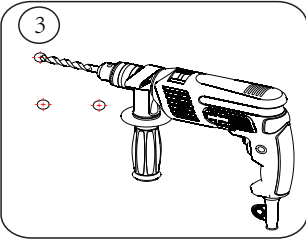


对准记号笔标注的位置钻Φ4mm，深50mm的孔(若安装的墙面贴有瓷砖时，请先用Φ7玻璃钻头钻穿瓷砖后，再用冲击钻进行墙面钻孔)；建议在螺丝安装孔周围涂布硅胶。

※木墙体不需要使用膨胀管。后续的步骤同【1.混凝土：螺丝与膨胀管固定的情况】④⑤⑥。

小便器/洗面器用扶手的检查项目


安装完成后，请确认以下项目。

- 扶手是否松动？
- 连接部位是否组装牢固？

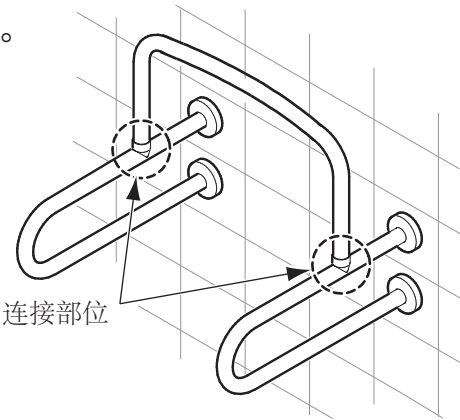


坐便器用扶手的安装

※必须安装在混凝土墙体上

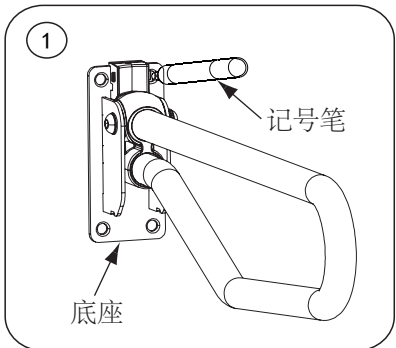

根据使用情况，用记号笔对准底座安装孔在墙面上标注钻孔位置。

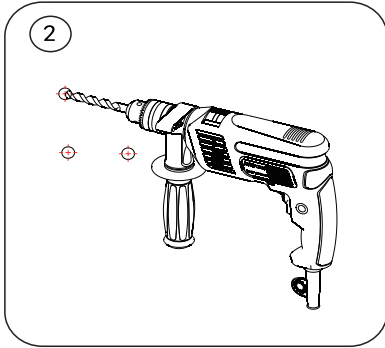

对准记号笔标注的位置钻Φ10mm，深50mm的孔(若安装的墙面贴有瓷砖时，请先用Φ10玻璃钻头钻穿瓷砖后，再用冲击钻进行墙面钻孔)。

5

使用上的注意

- 1.不允许湿手、涂香皂的手使用扶手，否则容易因手滑发生意外事故，行动不便人士需特别注意。
- 2.不能用于扶手以外的用途（如悬挂、攀爬、摇晃、踢踹、晾晒衣物及被褥等），否则可能会因手滑，扶手从墙壁脱落而绊倒，导致受伤。
- 3.不能把手腕伸进扶手和墙壁之间的区域，以免发生意外事故。
- 4.非专业人员不允许对产品进行拆卸、改装；定期确认产品是否有松动，防止扶手脱落及墙壁的损坏。
- 5.请务必缓慢地操作可抬起式扶手，扶手处于可活动状态时，不可将手指伸入；切勿在纵向竖立的状态下使用。

保养

- 为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水拧干后擦拭。
 - 2.当有水存留在产品表面时，需立即用软布擦拭干净。
 - 3.当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗，清洗完后需立即用软布把水渍擦拭干净。
 - 4.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

合格证

TOTO

检查合格证

产品型号：见包装上的标签

产品名称：见包装上的标签

生产日期：见包装上的标签

组装工厂：东陶机器（广州）有限公司

厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

检印

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：

800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地址：北京市朝阳区光华路1号


北京嘉里中心北楼1915室

网址：www.toto.com.cn


扫描二维码，服务预约，方便快捷

7


坐便器用扶手的安装

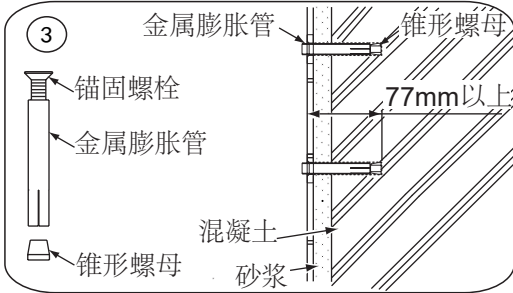

先将锥形螺母放入孔底部（大头朝内），再塞入金属膨胀管。将金属膨胀管分别插入钻好的孔中，用锤子将其敲至与墙面齐平；建议在锚固螺栓安装孔周围涂布硅胶。

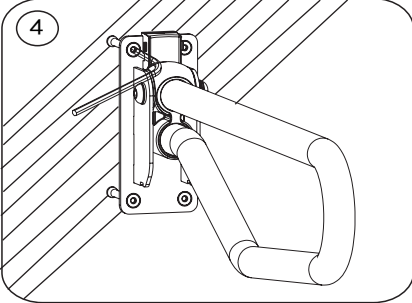

将锚固螺栓插入金属膨胀管内，用内六角匙拧紧，确认墙面和底座没有间隙。

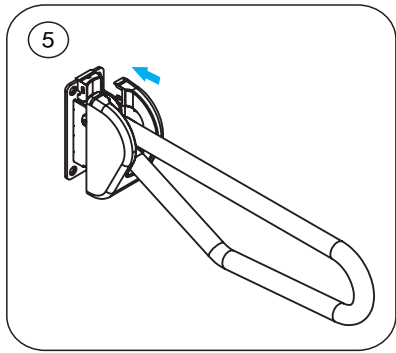


盖上装饰盖，确认装饰盖按压到墙面。

坐便器用扶手的使用方法

坐便器用扶手的操作方法

- 该扶手可向上翻折。
- 拉起扶手的情况：手持握杆，慢慢拉起。
 - 放下扶手的情况：放下握杆，保证其至水平位置。

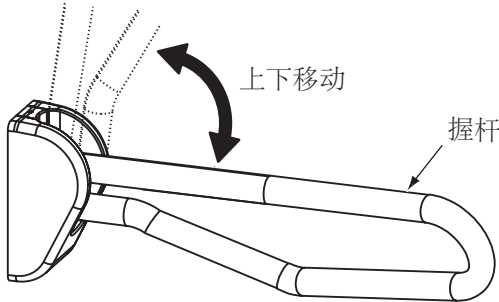

6

保证书

用户	
销售安装店	
安装日	
保修期	自安装日起保修期为1年。

*若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。

*本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。

*在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话报修。

*随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。

维修规定

- 1.保修期间，在用户正确按安装说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
- 2.在保修期内发生损坏需要得到免费维修时，请拨打全国售后服务电话报修。
- 3.在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
 - ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
 - ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
 - ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
 - ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用）。
 - ⑤ 沙粒或污物等造成的损伤。
 - ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
 - ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
 - ⑧ 本保证书没有指定的场合。
 - ⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、安装日期未填写的场合。
 - ⑩ 不能出示购买发票的场合。
 - ⑪ 由结冰引起的故障。
4. 本保证书只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

8